

Link do produktu: <https://pipilashes.pl/alpinuseptol-plyn-do-dezynfekcji-powierzchni-1-l-p-796.html>



## Alpinuseptol Płyn Do Dezynfekcji Powierzchni 1 L

Cena	<b>21,90 zł</b>
Numer katalogowy	<b>86687715</b>
Kod producenta	<b>_14377168072</b>
Kod EAN	<b>5908269291090</b>

### Opis produktu

#### Alpinuseptol 1L

#### Alpinuseptol – preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni

**Alpinuseptol** to preparat przeznaczony do **szybkiej dezynfekcji niewielkich powierzchni, wyrobów oraz urządzeń medycznych**. Cechuje się szybkim działaniem, jest gotowy do użycia i nie powoduje plam ani zacieków. W swoim składzie **Alpinuseptol nie zawiera aldehydów, fenoli, chloru ani kwasów** – może być stosowany również na powierzchniach mających kontakt z żywnością, jak np. blaty, szafki, czy stoły. **Preparat do dezynfekcji powierzchni** znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, w gabinetach specjalistycznych, przychodniach, salonach kosmetycznych i SPA, hotelach czy siłowniach i salach fitness.

#### Preparat do dezynfekcji powierzchni Alpinuseptol – właściwości:

- skuteczność działania na bakterie, grzyby, wirusy, prątki,
- gotowy do użycia,
- nie wymaga rozcieńczania,
- działa już w 15 sekund,
- nie powoduje plam, zacieków, ani smug,
- jest przebadany dermatologicznie,
- szybkooschnący **Alpinuseptol** można stosować również na powierzchnię urządzeń i maszyn nieinwazyjnych odpornych na działanie alkoholi, jak np:
  - sprzęt rehabilitacyjny,
  - sprzęt sportowy,
  - fotele i łóżka zabiegowe,
  - blaty stołów medycznych,
  - poręcze łóżek w szpitalach,
  - klamki, szafki, blaty i uchwyty.
- Uwaga! Nie należy stosować preparatu Alpinuseptol na inwazyjny sprzęt medyczny ani na materiały wrażliwe na działanie alkoholi. Podczas dezynfekcji urządzeń elektrycznych należy pamiętać, aby wcześniej odłączyć je od zasilania. Alpinuseptol – jak używać? Produkt nie wymaga rozcieńczania – jest gotowy do użycia np. w formie przecierania lub spryskiwania. Z odległości ok. 30 cm spryskać powierzchnię Alpinuseptołem, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Większą ilość preparatu można przetrzeć jednorazowym ręcznikiem papierowym. Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.